

Muestras de suero y /o lavado bronco alveolar contaminado por sangre.

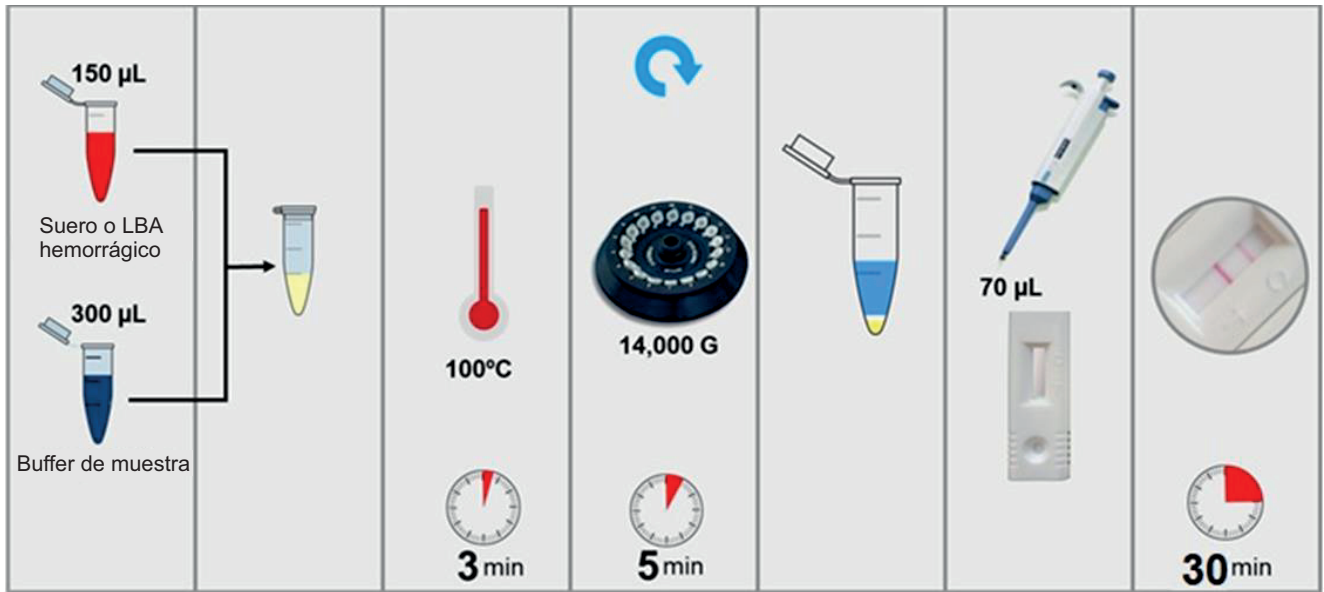



Figura 1

Interpretación de los resultados.

Resultado positivo: aparecen dos líneas rojas. Se pueden observar tanto la línea de test (T) y la línea de control (C). La línea de control se utiliza sólo como indicador de la validez del test, no es una referencia interna de la intensidad de la línea de test.

Resultado negativo: la línea roja aparece sólo en la zona de control (C). Los resultados negativos no deben leerse hasta que hayan transcurrido 15/30 minutos (según muestra).

Resultado no válido: no aparece ninguna línea en la zona de control (C). Los motivos más habituales son volumen de muestra insuficiente o una realización incorrecta de la técnica. Se recomienda revisar el procedimiento y repetir el test con un nuevo dispositivo.

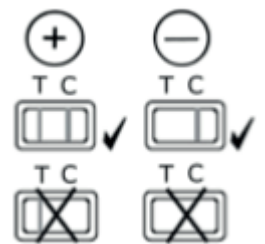

Resultados típicos

